



TheraPearl® 3-in-1 ThermoPerlen

Stillenden Müttern ans Herz gelegt

- Wohltuend als Wärmekissen
- Kühlend als Kältekomresse
- Stimulierend auch an Milchpumpen

Beispiel Katalogtext kurz

3-in1-ThermoPerlen sind die Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse während Ihrer Stillzeit. Die wärmende Anwendung mit 3-in-1 ThermoPerlen entspannt die Brust und unterstützt den Milchfluss. Gekühlt lindert das Perlenkissen Spannungen und Schmerzen und reduziert Schwellungen. Am Pumpentrichter einer Milchpumpe befestigt, kann das erwärmte Kissen zur Anregung des Milchspendereflexes beitragen und die abgepumpte Milchmenge erhöhen.

Beispiel Katalogtext lang

3-in1-ThermoPerlen sind die Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse während Ihrer Stillzeit! Wohltuend als Wärmekissen – Kühlend als Kältekomresse – Stimulierend auch an Milchpumpen

Anwendungsempfehlungen




Wärmende Anwendung: Legen Sie die 3-in-1 ThermoPerlen samt Schutzvlies in die Mikrowelle, siehe Tabelle! Eventuell im 5 Sekunden-Rhythmus fortfahren, bis Ihre persönliche Idealtemperatur erreicht wurde. Die Erwärmung in der Mikrowelle wird durch ein leicht knisterndes Geräusch begleitet, außerdem bläht sich das Kissen auf. Beide Merkmale sind typisch für Lansinoh 3-in-1 ThermoPerlen und kein Grund zur Beunruhigung.

Empfohlene Erwärmdauer für ein Perlenkissen:

700 Watt	16 Sekunden
1000 Watt	13 Sekunden
1250 Watt	11 Sekunden

Kühlende Anwendung: Für mindestens zwei Stunden im Kühlschrank oder Gefrierfach aufbewahren. Während Sie gemütlich zu Hause entspannen, können Sie die Perlenkissen zur Erleichterung auch einfach in den Still-BH legen.

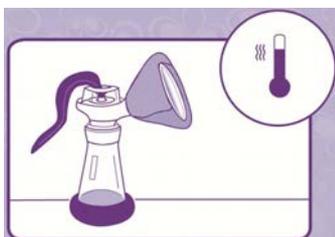

Anwendung an einer Milchpumpe: Erwärmen Sie 3-in-1 ThermoPerlen wie empfohlen. Das warme Perlenkissen wickeln Sie im Schutzvlies um den Pumpentrichter Ihrer Milchpumpe. Schließen Sie das Kissen mit dem Druckknopf. Das Kissen verbleibt auf dem Trichter während des Pumpvorgangs. 3-in-1 ThermoPerlen nicht länger als zwanzig Minuten auf der Brust oder Milchpumpe anwenden, um Überhitzung oder Verkühlen zu vermeiden.

Das Perlenkissen ist mit einer milden Seife oder Alkohol (z.B. aus der Apotheke) leicht zu reinigen.

Lansinoh® TheraPearl® 3-in-1 ThermoPerlen bitte nur mit Schutzvlies anwenden!

Artikelnummer: 10500, Inhalt: 2 Perlenkissen mit weichem Schutzvlies