



**Gebrauchsinformation!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**

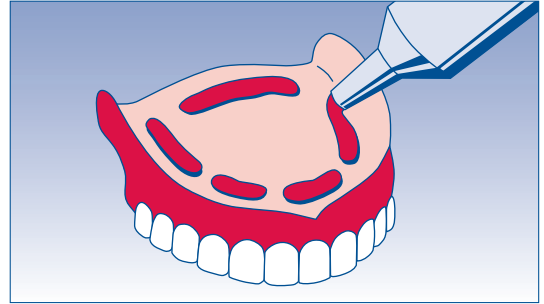

# Sicherheit für die Dritten. Protefix®

## Protefix® Haft-Creme Extra Stark

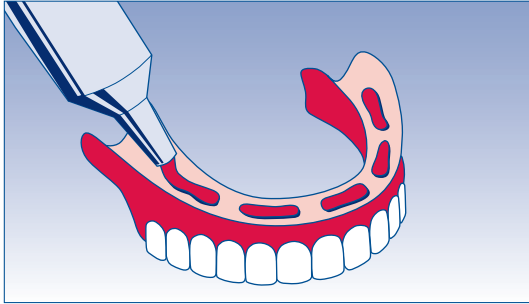

### **Anwendung**

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

### **Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

### **Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

### **Zusammensetzung:**

**Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark enthält:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin, Methyl-4-hydroxybenzoat.

  
**Queisser**  
PHARMA

D-24914 Flensburg  
www.queisser.de



# Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protetfix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

## Wie haben Sie **Protetfix®** kennengelernt?

- Apotheker     Bekannte  
 Zahnarzt     Werbung

## Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes  
 weil die Prothese sicher und lange haftet  
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

## Sind Sie zufrieden mit **Protetfix®** Haft-Creme?

- Ja     Nein, weil \_\_\_\_\_

## Verwenden Sie noch andere **Protetfix®** Produkte?

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und verwende **Protetfix®** Haft-Creme seit \_\_\_\_\_ Jahren.

## Ihre persönlichen Daten

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: [www.protetfix.de](http://www.protetfix.de) oder E-mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de).



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

# Dafür gibt es **Protetfix®** Wund- und Schutzgel

**Protetfix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protetfix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspangen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnspanne oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



**Protetfix®** Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN-Nr.: 2 651 753.