

Ihr nächster Termin

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Datum						
Uhrzeit						

Praxisstempel

Otovent®-System zur Linderung des negativen Mittelohrdrucks (Tubenfunktionsstörung)

Otovent



So wird Otovent® angewendet:

Stülpen Sie die Öffnung des medizinischen Ballons (Latex-Membran) über das flache Ende des Nasenstücks.



Drücken Sie das runde Ende des Nasenstücks vorsichtig gegen das rechte Nasenloch und halten Sie gleichzeitig das linke Nasenloch zu.



Atmen Sie tief durch den Mund ein, schließen Sie den Mund und blasen Sie den medizinischen Ballon, durch ausatmen durch die Nase, ungefähr bis zur Größe einer Grapefruit (Durchmesser ca. 10 - 12 cm) auf.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem linken Nasenloch. Durch das Aufblasen des Ballons sollte eine Druckveränderung im Ohr spürbar bzw. ein „Klicken“ im Ohr hörbar sein.

Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den gesamten Vorgang (s. oben) und beugen Sie zusätzlich den Kopf leicht nach vorne und drehen gleichzeitig den Kopf leicht nach rechts. Versuchen Sie zu schlucken, wenn der Ballon aufgeblasen ist. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang anschließend mit dem linken Nasenloch.

Ursachen für negativen Mittelohrdruck sind z.B.:

- entzündliche Erkrankungen des Nasen-Rachen-Raums (z.B. Erkältung, Schnupfen)
- Infektionen des Mittelohrs (Anfälligkeit bei Kleinkindern erhöht)
- Allergische Erkrankungen
- Chronische Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum
- rasche Druckveränderungen z.B. beim Tauchen oder im Flugzeug (Barotrauma)



Otovent®-System ist (in Deutschland) als Hilfsmittel verordnungsfähig, Hilfsmittelpositionsnr: 99.42.01.0001 Indikation: Tubenfunktionsstörung



CE

Originalpackung

Otovent®-System 1+5
Inhalt: 1 Nasenstück + 5 Ballons
+ 1 Aufbewahrungsbox
PZN (DE): 4676409
PZN (AT): 2647036

Großpackung

Otovent®-System 1+15
Inhalt: 1 Nasenstück + 15 Ballons
+ 1 Aufbewahrungsbox
PZN (DE): 4902863
PZN (AT): 2647042

Nachfüllpackung

Otovent®-System Ersatzballons 5 Stück
Inhalt: 5 Ballons
PZN (DE): 6438513
PZN (AT): 3435017

Anwendung

mindestens 2 - 3 mal täglich

Verwendbarkeit

Jeder medizinische Ballon (Latex-Membran) sollte maximal 20-mal aufgeblasen werden, danach ist die für den Druckausgleich notwendige Elastizität nicht mehr gewährleistet.

Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

