

# Lid-Care® Einzelpads

Die komplette Augenlidhygiene

**Lesen Sie die gesamte Produktinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Lid-Care Einzelpads beginnen.**

- Heben Sie die Produktinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Augenarzt oder Apotheker.

**Diese Produktinformation beinhaltet:**

1. Was sind Lid-Care Einzelpads und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lid-Care Einzelpads beachten?
3. Wie sind Lid-Care Einzelpads anzuwenden?
4. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?
5. Wie sind Lid-Care Einzelpads aufzubewahren?

## Lid-Care® Einzelpads

Lid-Care Einzelpads sind sterile, sanfte, mit Reinigungslösung vorbefeuchtete Einzelpads, die als Augenlidreiniger zum Entfernen von Kosmetika und zur täglichen Augenlidhygiene verwendet werden. Sie besitzen eine spezielle, reizarme, hypoallergene Formulierung.

Lid-Care Einzelpads ist in Apotheken als Packungen mit 20 vorbefeuchteten Einzelpads oder als 100 ml Lösung und 100 Pads (ca. 50 Anwendungen) erhältlich.

Bestandteile:

Aqua, Lauroamphodiacetate, Sodium Trideceth Sulfate, Hexylene Glycol, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Boric acid, Sodium borate, Disodium EDTA.

Lid-Care Einzelpads werden vertrieben durch:

Novartis Pharma GmbH  
90327 Nürnberg  
Telefon: (09 11) 273-0  
Telefax: (09 11) 273-12 653  
Internet/E-Mail: [www.novartispharma.de](http://www.novartispharma.de)

Der Hersteller ist:

EXCELVISION  
F-07100 Annonay  
Frankreich

### 1. Was sind Lid-Care Einzelpads und wofür werden sie angewendet?

Lid-Care Einzelpads sind sanfte, mit Reinigungslösung vorbefeuchtete Einzelpads, die für die tägliche Augenlidpflege entwickelt wurden. Ihre reizarme, hypoallergene Formulierung bildet einen Schaum aus Mikroblasen, um Kosmetika, fettige Ablagerungen und Krusten von Ihren Augenlidern und Wimpern entfernen zu können.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lid-Care Einzelpads beachten?

**Verwenden Sie Lid-Care Einzelpads nicht,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der am Anfang dieser Produktinformation aufgeführten Bestandteile von Lid-Care Einzelpads sind;
- wenn Sie gerötete Augen haben und/oder einen übermäßigen Tränenfluss bemerken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Lid-Care Einzelpads ist erforderlich,**

- wenn Sie zittrige Hände haben, da Sie eventuell unfreiwillig Reinigungslösung in die Augen bekommen könnten.

Verwerfen Sie die verwendeten Einzelpads nach der Reinigung des jeweiligen Augenlids. Verwenden Sie den gleichen Einzelpad nicht für beide Augen, weil dadurch vorhandene bakterielle Infektionen von einem Auge auf das andere übertragen werden können.

**Anwendung von Lid-Care Einzelpads bei Kindern**

Lid-Care Einzelpads sollten bei Kindern unter 3 Jahren nicht angewendet werden.

### 3. Wie sind Lid-Care Einzelpads anzuwenden?

Wenn Ihnen Lid-Care Einzelpads durch Ihren Augenarzt empfohlen wurden, befolgen Sie sorgfältig die Anweisung Ihres Arztes.

Lid-Care Einzelpads sind gebrauchsfertig. Verwenden Sie Lid-Care Einzelpads nicht, falls die Einzelpackungen beschädigt bzw. bereits geöffnet sind.

Die Einzelpads bleiben steril, bis die Einzelverpackung geöffnet wird.

Lid-Care Einzelpads dürfen nicht geschluckt werden.

Bringen Sie die Lid-Care Einzelpads nicht in direkten Kontakt mit Ihren Augen. Falls dies versehentlich geschieht, spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser, bis sie wieder beschwerdefrei sind.

1) Nehmen Sie den vorbefeuchteten Einzelpad aus der Packung und reiben Sie das zusammengelegte Pad zwischen Daumen und Zeigefinger. Die im Einzelpad enthaltene Lösung beginnt zu schäumen.



2) Falten Sie den Einzelpad in der Mitte und stellen Sie sich vor einen gut beleuchteten Spiegel und ziehen Sie das untere Augenlid sanft nach unten, so dass der Lidrand frei ist.



3) Wischen Sie mit dem gefalteten Einzelpad sanft mehrere Male über das Augenlid und den Wimpernboden. Achten Sie darauf, dass der Augapfel weder mit dem Einzelpad noch mit den Fingern berührt wird.

Nicht über das innere Augenlid wischen.



4) Wiederholen Sie den Vorgang mit dem oberen Augenlid.



5) Schließen Sie das Auge und reiben Sie mit dem Einzelpad über das obere und das untere Augenlid und die Wimpern. Werfen Sie danach den verschmutzten Pad weg.



Wiederholen Sie Punkt 1–5 am anderen Auge, verwenden Sie bitte dazu einen neuen Einzelpad.

Waschen Sie die geschlossenen Augen anschließend mit warmem Wasser und tupfen Sie sie trocken.

#### Wie viel ist zu verwenden?

In Abhängigkeit von der Reinigungswirkung können Lid-Care Einzelpads unterschiedlich häufig zur Lid-Reinigung angewendet werden müssen.

#### 4. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?

Obwohl die Inhaltsstoffe von Lid-Care Einzelpads sehr reizarm sind, kann bei einigen Anwendern ein leichtes Brennen auftreten, wenn die Pads direkt mit dem Auge in Kontakt kommen.

Lid-Care Einzelpads sind mit einer hypoallergenen Lösung vorbefeuchtet, Reizungen an den Augenlidern sollten nur in den seltensten Fällen auftreten. Sollten Sie jedoch eine Schwellung der Augenlider (Anzeichen einer allergischen Reaktion), ein starkes Jucken mit Rötung oder eine anhaltende Reizung bemerken, beenden Sie die Anwendung der Lid-Care Einzelpads.

#### 5. Wie sind Lid-Care Einzelpads aufzubewahren?

Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum verwenden.

Haltbarkeit: 24 Monate bei Lagerung bis 25 °C.

#### Stand der Information

März 2007