

blend-a-dent Premium-Haftcreme BESTE Krümelschutz

Produkt ID: TN-0003155



Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

EAN	08001090343857
FPC	81673353
Kategorie	Denture Care
Marke	Blend-A-Dent
Produktlinie	Food Seal
Gültigkeitsdaten	-
Produkttitel super lang	Blend-a-dent Plus Krümelschutz Haftcreme Neutral 40 g
Produkttitel lang	Blend-a-dent Plus Beste Krümelschutz-Technologie Premium Haftcreme, 40g
Produkttitel kurz	Blend-a-dent Plus Premium Haftcreme, 40g

Produktbeschreibung	Verhindern Sie irritierende Krümel und genießen Sie mit der Blend-a-dent Plus Krümelschutz Premium Haftcreme den ganzen Tag lang sicheren Halt für Ihre Dritten. Die beste Krümelschutz-Technologie innerhalb des Blend-a-dent Sortimentes. Sie finden, dass es nichts Irritierenderes gibt, als Speisereste unter der Zahnprothese? Entwickelt, um Ihnen den besten Krümelschutz innerhalb des Blend-a-dent Sortimentes zu bieten, ist diese Haftcreme dann die beste Lösung. Blend-a-dent Plus Krümelschutz erzeugt einen bis zu fünfmal besseren Krümelschutz, dank der im Vergleich zu Blend-a-dent Complete 75% dünneren Dosierspitze. So können Sie die Haftcreme in einer geraden und durchgehenden Linie statt in einzelnen Punkten auftragen. Auch bietet die Haftcreme starken Halt, sodass Ihre Zahnprothese immer an Ort und Stelle bleibt, während Sie essen, was Sie möchten. Dank des Polster-Effekts zwischen Zahnfleisch und Zahnprothese verspüren Sie noch mehr Tragekomfort – den ganzen Tag über. Blend-a-dent Plus Krümelschutz ist ohne Eigengeschmack und hat auch keinen Einfluss auf den Geschmack von Lebensmitteln.
Produkteigenschaft 1	Die beste Krümelschutz-Technologie von Blend-a-dent: Bis zu fünfmal besserer Krümelschutz
Produkteigenschaft 2	Starker Halt im Vergleich zur Anwendung ohne Haftcreme; hält die Zahnprothesen sicher an Ort und Stelle
Produkteigenschaft 3	Erzeugt einen Krümelschutz, der verhindert, dass Speisereste unter Ihre Zahnprothese gelangen
Produkteigenschaft 4	75% dünnere Dosierspitze für ausgezeichneten Krümelschutz und einfache Anwendung in durchgehender Linie
Produkteigenschaft 5	Fungiert als Polster zwischen Zahnfleisch und Zahnprothese für einen individuell angepassten Sitz
Produkteigenschaft 6	Geschmacksfreie Pflegeformel ohne Einfluss auf den Geschmack von Lebensmitteln
Produkteigenschaft 7	Für Voll- und Teilprothesen geeignet
Suchbegriffe allgemein	gebiss, haftmittel, paste, fixodent, kukident, blend-, a, dent, pro, plus, complete, blend-a-dent, vollprothese, teilprothese, frisch, neutral, original, passen, sicher, komfortabel, halt, starker halt, schutz vor, essensresten, krümelschutz, verhinderung von krümeln, zwischen gebiss und zahnfleisch, premium, herausragende, pro, professional, zahnpflege, erwachsener, zahn, prothese, erwachsene, ältere, gebiss, haftmittel, haftcreme, blendadent

Stammdaten
Logistische Daten
Verpackungsinformationen
Kategoriespezifika

Verbrauchereinheit Höhe (mm) 142

Verbrauchereinheit Tiefe (mm) 32

Verbrauchereinheit Breite (mm) 40

Verbrauchereinheit Gewicht (g) 57

Versandereinheit Höhe (mm) 125

Versandereinheit Tiefe (mm) 151

Versandereinheit Breite (mm) 135

Versandereinheit Gewicht (g) 745

Einheiten pro Karton 12

EAN 14 - AktiveBarcode 8001090343864

Stammdaten
Logistische Daten
Verpackungsinformationen
Kategoriespezifika

Inhaltsstoffe	Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, CI 15985, CI 45410
Kundenservice Rufnummer	0800 588 9199
Kundenservice Hinweis	Frage? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
Anwendungshinweise	<p>Gebrauchsanweisung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahnersatz und Zahnfleisch gründlich reinigen. 2. Tragen Sie die Haftcreme punktuell in Abständen entlang der Ränder und Oberflächen Ihres Zahnersatzes auf, die mit dem Mund in Kontakt kommen. 3. Spülen Sie den Mund mit Wasser aus, bevor Sie Ihre Dritten einsetzen. Unsere Haftcreme wurde so entwickelt, dass Sie mit Feuchtigkeit reagiert, um eine dichte, enge Krümelschutz-Barriere zu errichten. 4. Drücken Sie die Zahnprothese fest auf die vorgesehene Stelle und halten Sie diese kurz gedrückt. 5. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie 15–30 Minuten warten, bevor Sie etwas essen oder trinken.
Warnhinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Herstellername	Procter & Gamble
Herkunftsland	Deutschland
Rücksendeanschrift	Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach Am Taunus Germany
Füllmenge	0
Füllmenge Einheit	N/A
Art der Verpackung	Tube

Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Flamme (GHS02) - Leicht-/Hochentzündlich	No		
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	No		
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	No		
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	No		
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	No		
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	No		
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	No		
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	No		
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	No		
Signalwort	Warning		